


# Montageanleitung

## Erste-Hilfe-Station Classic

### 1. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen

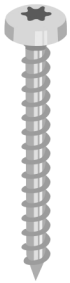

**2x**

Schraube PanHead  
mit Torx, verz., 4 x 40



**10x**

Schraube Senkkopf  
mit Torx, verz., 4 x 40/24



**14x**


Kunststoffdübel  
6mm

#### **1x** Grundplatte Erste-Hilfe-Station Classic

Dazu passendes Befestigungsmaterial

**4x** Schraube Senkkopf mit Torx

**4x** Kunststoffdübel 6mm


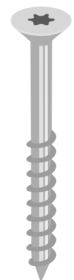


#### **1x** Erste-Hilfe-Koffer Classic, mit Wandhalterung

Dazu passendes Befestigungsmaterial

**4x** Schraube Senkkopf mit Torx

**4x** Kunststoffdübel 6mm

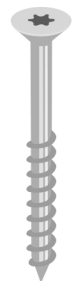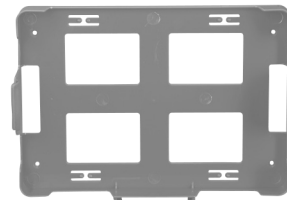



#### **1x** K.57 Augenspülflasche, 500 ml/Flasche, DIN 15154-4

#### **1x** Halter für Augenspülflasche, 500 ml

Dazu passendes Befestigungsmaterial

**2x** Schraube Senkkopf mit Torx

**2x** Kunststoffdübel 6mm

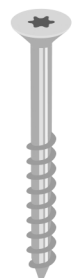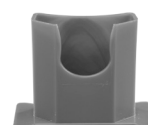

Für die vollständige Auflistung der Komponenten Zettel bitte wenden

**1x** K.57 Pflasterspender, gefüllt (elastische u. wasserfeste Pflaster)

Dazu passendes Befestigungsmaterial

**2x** Kunststoffdübel 6mm




**1x** Prospekthalter DIN A5

**1x** Etikett Verbandblock

Passendes Befestigungsmaterial

**2x** Schraube PanHead mit Torx

**2x** Kunststoffdübel 6mm

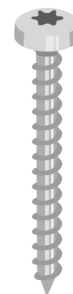

## 2. Die Montagefläche vorbereiten

Richten Sie die Grundplatte mit einer Wasserwaage an der Wand aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an (A). Danach bohren Sie die Löcher und setzen anschließend die passenden Dübel ein.

## 3. Die Grundplatte anschrauben

Bringen Sie die Grundplatte mit den passenden Schrauben an der Wand an.

## 4. Die Erste-Hilfe-Station ausstatten

Befestigen Sie die Halterungen und Komponenten an der befestigten Grundplatte und statten Sie sie mit den jeweils passenden Artikeln aus (B).

