

Montageanleitung

Erste-Hilfe-Station Premium

1. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen




1x Grundplatte Erste-Hilfe-Station Premium

Dazu passendes Befestigungsmaterial

5x Abstandshalter

5x Kunststoffdübel 6mm

5x Schraube Senkkopf mit Torx

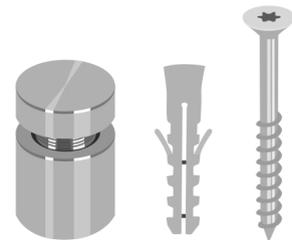


1x Erste-Hilfe-Koffer Classic, mit Wandhalterung

Dazu passendes Befestigungsmaterial

4x Unterlegscheibe

4x Sechskantmutter M4

4x Schraube mit Innensechskant M4

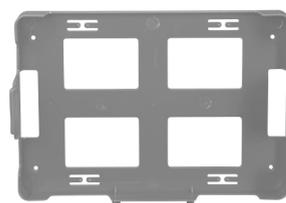

1x K.57 Augenspülflasche, 500 ml/Flasche, DIN 15154-4

1x Halter für Augenspülflasche, 500 ml

Dazu passendes Befestigungsmaterial

2x Unterlegscheibe

2x Sechskantmutter M4

2x Schraube mit Innensechskant M4



Für die vollständige Auflistung der Komponenten Zettel bitte wenden



1 x K.57 Pflasterspender, gefüllt (elastische u. wasserfeste Pflaster)

Dazu passendes Befestigungsmaterial

2 x Unterlegscheibe

2 x Sechskantmutter M5

2 x Senkschraube mit Innensechskant M5

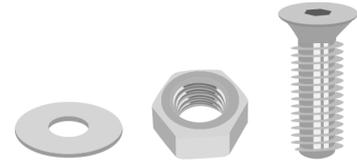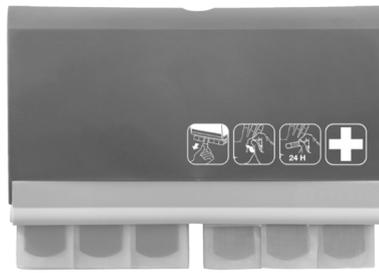

1 x Prospekthalter DIN A5


1 x Etikett Verbandblock

Passendes Befestigungsmaterial

2 x Unterlegscheibe

2 x Sechskantmutter M4

2 x Linsenschraube mit Innensechskant M4

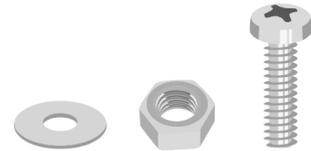

2. Die Montagefläche vorbereiten

Richten Sie die Grundplatte mit einer Wasserwaage an der Wand aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an (A). Danach bohren Sie die Löcher und setzen anschließend die passenden Dübel ein.

3. Die Komponenten anbringen

Bringen Sie die Komponenten und Halter mit dem dazu passenden Befestigungsmaterial vor der Montage an der Grundplatte an (B).

4. Die Grundplatte anschrauben

Jetzt können Sie die Grundplatte mit den passenden Schrauben und Abstandshaltern an der Wand befestigen.

5. Die Erste-Hilfe-Station ausstatten

Statten Sie die Halterungen nun mit den jeweils passenden Artikeln aus (B).

